

Soutien ergonomique pour genou

Description produit

Conçu pour fournir un soutien léger aux ligaments latéraux. La baleine spirale flexible sur chaque côté aide à stabiliser les ligaments du genou. La conception en croisé à l'arrière assure le confort lors de l'activité quotidienne.

Caractéristiques

- Baleine spirale flexible sur chaque côté
- Composé de 67% nylon, 23% élastique et 10% lycra
- Soutien léger
- Ajustement facile et ergonomique
- Couleur : beige

Fabriqué : 67% nylon, 23% élastique et 10% lycra

Indications

- Les sports ou activités requérant des mouvements de torsion (ex. golf, sports de raquette) ne nécessitant pas de flexions complètes et répétitives du genou
- Port prolongé

Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE GENOU	TAILLE
9222	26 - 31 cm (10" - 12")	PETIT
9223	31 - 36 cm (12" - 14")	MOYEN
9224	36 - 41 cm (14" - 16")	GRAND
9225	41 - 48 cm (16" - 19")	TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurer la circonférence du genou. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

Ajustement

Enfilez le soutien jusqu'au genou. Ajustez pour que les deux baleines spirales stabilisent la rotule et que l'entrecroisé se place confortablement à l'arrière du genou.

Entretien

Laver à la main avec du savon doux et sécher à l'air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.

