

Stabilisateur de pouce

Description produit

Conçu pour aider à réduire la douleur associée à une foulure, entorse mineure, arthrite, arthrose et durant la guérison de la ténosynovite du pouce (Syndrome de De Quervain).

Le Stabilisateur de pouce est aussi recommandé comme soutien après une chirurgie.

Caractéristiques

- Soutien accru
- Tension ajustable autour du pouce
- Néoprène avec nylon brossé et ratine à l'intérieur
- Ajustement facile
- Ambidextre
- Couleur : noir

Fabriqué : de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine.



Indications

- Foulure et entorse du pouce
- Arthrite
- Arthrose
- Ténosynovite du pouce (syndrome / maladie de Quervain): inflammation de la gaine synoviale du tendon à la base du pouce

Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE POIGNET	TAILLE
9970	15 - 20 cm (6'' - 8'')	PETIT/MOYEN
9971	20 - 25 cm (8'' - 10'')	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du poignet. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

Ajustement

Enfilez le support de façon à ce que les deux renforts immobilisent le pouce. Attachez tout d'abord la bande Velcro® sur le poignet pour stabiliser le support. Ensuite, ajustez la tension autour du pouce en attachant la petite bande Velcro®.



Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.