

## Support pour poignet

### Description produit

Conçu pour aider à réduire les symptômes associés au Syndrome du canal carpien et autres blessures du poignet. Ce support procure un soutien modéré lorsqu'une stabilisation rigide est nécessaire. L'attelle métallique intégrée réduit les mouvements de flexion et le néoprène, principale composante de ce produit, assouplit les muscles et les ligaments.

### Caractéristiques

- Tension ajustable grâce aux attaches de type Velcro®
- La tige amovible en aluminium limitant les mouvements du poignet est malléable pour permettre, lorsque nécessaire, l'ajustement à un angle différent
- Peut être porté jour ou nuit
- Ajustement facile
- Couleur : beige



**Fabriqué :** de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine.

### Indications

- Syndrome du canal carpien
- Tendinite
- Post traumatique
- Post chirurgical

### Tailles disponibles

GAUCHE	DROITE	CIRCONFÉRENCE POIGNET	TAILLE
9270	9275	12 - 15 cm (5'' - 6'')	TPETIT
9286	9288	15 - 20 cm (6'' - 8'')	PETIT/MOYEN
9287	9289	20 - 26 cm (8'' - 10'')	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du poignet. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

### Ajustement

Enveloppez votre poignet en gardant l'attelle à l'intérieur de la main. Ajustez la tension en attachant les bandes Velcro® convenablement.

**Entretien**

Retirez l'attelle métallique, lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

**Mise en garde :** Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.