

Ceinture de sécurité

Description produit

La ceinture de sécurité s'adapte à un lit d'hôpital, un fauteuil ou un fauteuil roulant pour empêcher le patient de glisser ou de tomber. Permet à la personne de pouvoir se tourner lorsque couchée.

Caractéristiques

- Revêtement extérieur en coton laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Courroies en polypropylène extra-longues
- Hauteur : 14.5 cm (5.75")

Tailles disponibles

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR	COULEUR	TAILLE
7809	SANS BOUCLE	58 cm (23")	VERT	PETIT/MOYEN
7810	AVEC BOUCLE	58 cm (23")	VERT	PETIT/MOYEN
7811	SANS BOUCLE	76 cm (30")	BLEU	GRAND/TGRAND
7812	AVEC BOUCLE	76 cm (30")	BLEU	GRAND/TGRAND



Ajustement :

1. Installer le patient au fauteuil ou chaise gériatrique.
2. Placer la ceinture de sécurité sur le patient. Enrouler les courroies avant autour des appuis-bras de la chaise ou au dos du fauteuil gériatrique.
3. Boucler solidement et s'assurer que les extrémités ne réduisent pas ou n'entravent pas le mouvement du fauteuil. Laisser l'épaisseur d'une main entre la taille de la personne et la contention.
4. Voir à ce que le patient soit en position de confort. Vérifier l'état de la peau au niveau des aines régulièrement.

Avertissement : Utiliser seulement en position assise.

* VEUILLEZ NOTER QUE LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE VOUS EST REMISE À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET QU'IL EN VA DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE S'ASSURER QUE LA MÉTHODE D'UTILISATION DU PRODUIT EST ADAPTÉE À CHAQUE CIRCONSTANCE SPÉCIFIQUE DE L'UTILISATEUR.