


## Compresse de gel

### Compresse froide instantanées

Compresse thérapeutique à utiliser pour les douleurs générales, les enflures et les ecchymoses.

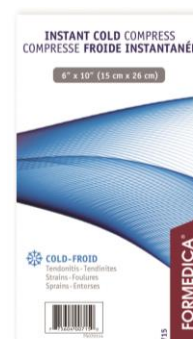

### Caractéristiques

- Réaction chimique froide instantanée
- Usage unique : reste froide environ 30 minutes
- Non-toxique

### Formats disponibles

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
712	Compresse de thérapie par le froid à texture douce (applicable directement sur la peau)	10 x 15 cm (4" x 6")
715	Compresse de thérapie par le froid	15 x 26 cm (6" x 10")

### Mode d'emploi

1. Plier en deux afin de faire «éclater» le liquide à l'intérieur du sac
2. Agiter pour bien mélanger
3. Appliquer sur la région blessée

### AVERTISSEMENTS :

- Tenir loin des yeux lors de l'activation de la compresse. Si le contenu de la compresse entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
- Ne pas appliquer sur une plaie ouverte. Toujours tester la température de la compresse avant application.
- Pour usage externe seulement. L'utilisation sans surveillance d'une compresse par des enfants, des personnes âgées ou des personnes inaptes est dangereuse.
- Nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, boire plusieurs verres d'eau et contactez immédiatement votre centre antipoison local.
- Jeter en cas de perforation ou de fuite de la compresse.
- Garder hors de la portée des enfants.