

Immobilisation pour poignet FORMEDICA™

Description produit

Recommandées comme immobilisation d'urgence et dans les cas de fractures partielles, entorses sévères. Peut aussi être indiquée pour soulager une tendinite épicondylienne et les symptômes du syndrome du tunnel carpien. Maintient le poignet en position neutre et empêchent les mouvements de flexion et d'extension.

Caractéristiques

- Une tige cuillère d'aluminium amovible et malléable
- Revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Ajustement au niveau du pouce avec attache de type Velcro®
- Couleur : gris

Fabriqué : Revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine

Indications

- Immobilisations d'urgence
- Fractures partielles
- Entorses sévères

Tailles disponibles

GAUCHE	DROITE	TAILLE
679974	679975	UNIQUE

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du poignet.

Ajustement

Enfilez l'attelle à l'intérieur de la main (étape 1). Ajustez la tension en attachant les bandes Velcro® adéquatement (étape 2).

Entretien

Enlever les tiges. Laver à cycle délicat et sécher à l'air.

