

Support ajustable pour genou

Description produit

Conçu pour stabiliser les articulations et protéger la rotule. Le support ajustable pour genou fournit un support confortable aux muscles et aux ligaments affaiblis du genou suite à une entorse ou autres blessures impliquant le genou. Le néoprène retient la chaleur corporelle, augmentant ainsi la circulation sanguine et aidant à assouplir les muscles. Il est recommandé dans le traitement des blessures sportives telles foulure, entorse, etc...

Caractéristiques

- Tension ajustable grâce aux attaches de type Velcro®
- Demeure efficace, même mouillé
- Retient la chaleur corporelle et assouplit les muscles
- Néoprène avec nylon broissé et ratine à l'intérieur
- Ajustement facile
- Couleur : noir



Fabriqué : de néoprène recouvert de nylon broissé avec intérieur en ratine.

Indications

- Foulure, entorse, élongation, surmenage musculaire
- Pratique sportive: sports de raquette, sports de ballon, jogging, vélo
- Marche
- Travaux lourds

Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE GENOU	TAILLE
2018	33 - 41 cm (13" - 16")	PETIT/MOYEN
2019	41 - 51 cm (16" - 20")	GRAND/TGRAND
2022	51 - 58 cm (20" - 23")	TTGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du genou au milieu de l'articulation. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

Ajustement

Enveloppez le genou en attachant tout d'abord le Velcro[®] du bas (étape 1). L'ouverture en rond sur le support doit se trouver autour de la rotule. Attachez le Velcro[®] du haut afin de stabiliser le genou (étape 2). Vous devriez être en mesure de plier votre genou sans bloquer la circulation sanguine.

Entretien

Laver à la main avec du savon doux et sécher à l'air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.