

Botte de marche

Description produit

La botte de marche permet l'immobilisation totale de la cheville et du pied en cas de fracture ou d'entorse.

Indications

Recommandée après un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

Caractéristiques

- Modèle ergonomique rigide
- Légère et confortable
- Doublure faite en nylon brossé sur caoutchouc mousse
- Fermetures de type Velcro®
- Semelle antidérapante
- Couleur : noir



Tailles disponibles

CODE	POINTURE HOMME	POINTURE FEMME	TAILLE
6701	3.5 – 6.5	4.5 – 7.5	PETIT
6702	6.5 – 9.5	7.5 – 10.5	MOYEN
6703	9.5 – 12.5	10.5 – 13.5	GRAND

Ajustement :

1. Détacher les sangles et retirer la doublure de la botte de marche. Enrouler le support autour du pied.
2. Placer le pied dans la coquille extérieure.
3. Placer la plaque protectrice sur le devant de la botte et sécuriser avec les sangles de type boucle et crochet en partant de l'orteil jusqu'en haut du mollet.

Entretien :

Laver la doublure avec un détergent doux dans l'eau froide. Sécher à l'air ambiant.

Mise en garde :

Ce produit doit être ajusté et porté sous la supervision d'un spécialiste de la santé.