

Gilet de sécurité croisé

Description produit

Le gilet de sécurité croisé permet d'éviter les chutes du fauteuil tout en assurant une liberté de mouvement appréciable.

Caractéristiques

- **Important** : Ce gilet doit être croisé sur la poitrine. Ne jamais installer à l'envers.
- Boucles d'attaches aux épaules empêchent le patient de se pencher vers l'avant
- Filet de polyester
- 2 courroies de nylon tissé extra-longues
- Tailles pour adulte



Tailles disponibles

CODE	COULEUR	TAILLE
7907	BLANC AVEC BORDURE ROSE	PETIT
7908	BLANC AVEC BORDURE VERTE	MOYEN
7909	BLANC AVEC BORDURE BLEUE	GRAND

Ajustement :

1. Installer le gilet sur le patient, la partie avec l'étiquette FORMEDICA® au dos du patient. Fermer la fermeture glissière au dos.
2. Installer le patient dans le fauteuil roulant.
3. Enrouler les courroies autour des appuis-bras du fauteuil roulant.
4. Boucler solidement et s'assurer que les extrémités ne réduisent pas ou n'entravent pas le mouvement du fauteuil du patient.
Laisser l'épaisseur d'une main entre la taille du patient et la contention.
5. Voir à ce que le patient soit en position de confort. Vérifier l'état de la peau au niveau de la taille et des hanches à toutes les heures.

Avertissement : Utiliser seulement en position assise.

* VEUILLEZ NOTER QUE LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE VOUS EST REMISE À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET QU'IL EN VA DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE S'ASSURER QUE LA MÉTHODE D'UTILISATION DU PRODUIT EST ADAPTÉE À CHAQUE CIRCONSTANCE SPÉCIFIQUE DE L'UTILISATEUR.