

Immobilisation épaule et bras Formedica™

Description produit

Les attaches retiennent la partie inférieure de l'humérus et le poignet vis-à-vis du thorax. L'immobilisation peut se porter au bras droit ou gauche pour immobiliser efficacement l'épaule.

La partie supérieure du bras attachée permet d'effectuer des exercices de rééducation.



Caractéristiques

- Élastique chirurgical
- Attaches de type Velcro®
- Modèle unisexe
- Couleur : blanc

Indications

- Contusion
- Entorse
- Subluxation
- Luxation

Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE THORAX	TAILLE
7280	64 - 79 cm (25" - 31")	PETIT
7281	79 - 94 cm (31" - 37")	MOYEN
7282	94 - 110 cm (37" - 43")	GRAND
7283	110 - 125 cm (43" - 49")	TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du thorax (sous la poitrine).

Ajustement

1. Ouvrir la courroie du bras et la glisser entre le bras blessé et le corps en s'assurant que les courroies du poignet et de la main soient vers l'avant. Par la suite, refermer la courroie.

2. Installer la ceinture sur le thorax du patient en refermant la partie Velcro® rude sur le tissu doux. Il est important de s'assurer que la partie étroite de la ceinture soit bien au centre du thorax et que la hauteur de celle-ci soit supérieure au coude de l'épaule blessée.

3. Remonter l'avant-bras en formant un angle de 90° avec le corps et refermer la courroie du poignet.



4. Installer la courroie pour la main (pouce à l'extérieur). Cette courroie peut être déplacée vers la gauche ou la droite pour assurer un bon positionnement.

Entretien

Laver la doublure avec un détergent doux dans l'eau froide. Sécher à l'air ambiant.