

## Immobilisation épaule et bras Uni-For™

### Description produit

Soutient le poids du bras et restreint fermement le mouvement au niveau de l'épaule. Élimine la fatigue cervicale en transférant le poids du bras blessé sur l'épaule opposée.

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Courroies en polypropylène
- Attaches de type Velcro®
- Couleur : gris bordure noire

### Indications

- Contusion
- Entorse
- Subluxation
- Luxation

### Tailles disponibles

| CODE | TAILLE        |
|------|---------------|
| 8771 | TAILLE UNIQUE |

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du thorax (sous la poitrine).

### Ajustement

Placer le coude en premier. Attacher la bande autour du thorax. Ajuster et fermer les courroies à l'épaule. En dernier, placer le coussin par-dessus le bras.

### Entretien

Laver à la main avec un savon doux et laisser sécher à l'air ambiant.

