

## Immobilisation pour poignet SPEC™

### Description produit

Recommandées comme immobilisation d'urgence et dans les cas de fractures partielles, entorses sévères. Peut aussi être indiquée pour soulager une tendinite épicondylienne et les symptômes du syndrome du tunnel carpien. Maintient le poignet en position neutre et empêchent les mouvements de flexion et d'extension.



### Caractéristiques

- Une large tige d'aluminium déplaçable sur le dessus du poignet
- Une tige cuillère d'aluminium amovible et malléable
- Système d'attache fixe avec une large bande élastique et fermeture Velcro®
- Ajustement au niveau du pouce avec attache de type Velcro®

**Fabriqué :** Revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine

### Indications

- Immobilisations d'urgence
- Fractures partielles
- Entorses sévères

### Tailles disponibles

GAUCHE	DROITE	CIRCONFÉRENCE POIGNET	TAILLE
SPC074	SPC076	25 cm (10")	PETIT/MOYEN
SPC075	SPC077	29 cm (11.5")	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du poignet.

### Ajustement

Enfilez l'attelle à l'intérieur de la main (étape 1). Ajustez la tension en attachant les bandes Velcro® adéquatement (étape 2).

### Entretien

Enlever la tige d'aluminium. Laver à cycle délicat et sécher à l'air.