

Soins à domicile


Masques de protection

Masque de procédure

Ce masque de protection capture les particules dans l'air à plus de 95% d'efficacité. Les masques de procédure Formedica offre une excellente protection, tout en étant confortables.

Caractéristiques

- Barrette d'ajustement au nez
- Texture douce et non irritante
- Sans latex ni fibre de verre
- Coefficient de filtration bactérienne > 95%
- Boucles auriculaires
- Respiration aisée

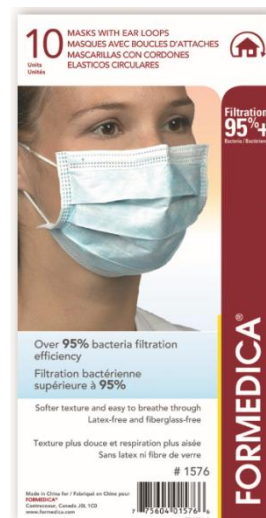

Spécifications

Efficacité de filtration des bactéries : 95%

Efficacité de filtration des particules : 94%

Résistance aux fluides : 80MMHG

Code	Emballage	Qté/emballage
1576	Sachet	10
501578	Boîte	50

Mode d'emploi

1. Déplier le masque (côté blanc vers le visage) : le tenir par le haut (bague) et passer les doigts dans les élastiques
2. Passer les boucles en arrière des oreilles
3. Ajuster la barrette autour de la base du nez
4. Tirer le bas du masque en-dessous du menton
5. Jeter après utilisation, ne pas réutiliser